Fiche Technique des masques KLESLO* SP140

« Grand Public » Usage Non Sanitaire Catégorie 1 (Suivant la norme AFNOR SPEC S76-001 du 27 mars 2020)

FABRICATION FRANCAISE



DOMAINE UTILISATION

Ce masque est destiné au milieu professionnel et est exclusivement réservé à des Usages Non Sanitaire (UNS). Il est destiné à prévenir les projections de gouttelettes. L'utilisation de ce masque s'inscrit dans la stricte application des mesures liées au confinement, des mesures d'organisation du travail ainsi que des gestes barrières. Ce masque individuel est destiné à être proposé aux professionnels en contact avec le public, amenés à rencontrer un grand nombre de personnes lors de leurs activités (hôtesses de caisses, agents des forces de l'ordre). Il n'est pas destiné à être utilisé par les personnels soignants au contact des patients.

PERFORMANCE

Conforme au guide d'exigences de fabrication des masques barrières de la **norme AFNOR SPEC S76-001 du 27/03/2020** et au Protocole d'essais décrit dans le document DGA du 25 mars 2020. Rapport **DGA RP/20-4245/DGA MNRBC/2000305/NP** et **IFTH/2020-06-04-091-60**

Masque catégorie 1 « UNS1 » = masques individuel à usage des professionnels en contact avec le public.

Efficacité de filtration des particules de 3 μm : 99 % Efficacité de filtration des particules de 1 μm : 98 %

Respirabilité: essai de perméabilité à l'air = 595 L.m².S-1 pour une dépression de 100 Pa

UTILISATION

Le temps de port du masque est limité à 4 heures Recommandations de manipulation des masques :

- Laver une fois avant la première utilisation ;
- Avant de mettre un masque, se laver les mains à l'eau et au savon ou avec une solution hydroalcoolique;
- Appliquer le masque de façon à recouvrir le nez et la bouche et veiller à l'ajuster au mieux sur le visage ; vérifier l'absence de jet d'air dans les yeux lors d'une expiration forte ;
- Lorsque l'on porte un masque : éviter de le toucher ; ne pas déplacer le masque ;
- Chaque fois que l'on touche un masque usagé, se laver les mains à l'eau et au savon ou à l'aide d'une solution hydroalcoolique;
- Pour retirer le masque : l'enlever par derrière (ne pas toucher le devant du masque) ; le mettre immédiatement dans un sac prévu à cet usage ; se laver les mains avec de l'eau et du savon ou à l'aide d'une solution hydroalcoolique.
- Lavable 60 fois.

ENTRETIEN & LAVAGE

Après utilisation, le masque doit être isolé pour être lavé. Il est recommandé d'isoler le masque dans un sac plastique ou dans un sac réutilisable à laver. Masque et sac peuvent être lavés ensembles et dans ce cas, sortir le masque du sac. Explication sur la méthode de lavage : Lavage en machine ménager à 60°C avec détergent classique. Séchage en sèche-linge.

Composition de la matière principale : 2 épaisseurs de Non Tissé Spunbond 100% polypropylène, 60 g/m2 par couche.

Stockage : masques non utilisés à stocker dans un endroit propre, sec et à l'abri de la lumière. **Contexte d'utilisation :** ce masque est strictement adapté à la crise sanitaire liée au COVID 19.

Ce masque n'exonère absolument pas l'utilisateur de l'application des gestes barrières qui sont essentiels.



Fabrication KLESLO
980 rue Blaise Pascal
39000 LONS-LE-SAUNIER
Tél: +33 (0)3.84.43.91.67

Email: info@kleslo.com